

Pluryal®



YOUR MOST
BEAUTIFUL
AGE IS NOW!

Pluryal® DENSIFIERS

Nowość! **PIERWSZA NA ŚWIECIE**

Linia certyfikowanych biostymulatorów i zagęszczaczy tkankowych.

BEZPIECZEŃSTWO stosowania w obszarach potwierdzone w IFU:

Okolice oczu: bez obrzęków, zaczerwienień czy ziarnin

Leczenie łysienia: jedyny PN dopuszczony na skórę owłosioną głowy

Cienka i problematyczna skóra: spełnienie najwyższych standardów

EUROPEJSKI PRODUCENT

Luksemburg



Wyłączny dystrybutor



**YOUR MOST
BEAUTIFUL
AGE IS NOW!**

MAGAZYN ESTETYCZNY: REGENERACJA SKÓRY W OKOLICACH OCZU DZIĘKI PLURYAL SILK



Pluryal

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR
INNEMEDIS

DENSIFIER PN



Pluryal Silk
Polynucleotide intradermal gel
2ml

DENSIFIER PN



Pluryal Densify
Polynucleotide and hyaluronic acid intradermal gel
2ml

DENSIFIER BIO



Pluryal Biosculpture
Cross-linked hyaluronic acid
2 x 1.1ml

DENSIFIER PN



Pluryal Hair Density
Polynucleotide intradermal gel
2ml


VIVA! EKSTRA BEAUTY:

DR KRZYSZTOF ZIEMLEWSKI,
DR KAROLINA PAZERA, DR EWA RYBICKA
O BIOSTYMULATORACH PLURYAL!



Pluryal

Pluryal® Densifiers (zagęszczacze tkankowe)- TECHNOLOGIA HPN

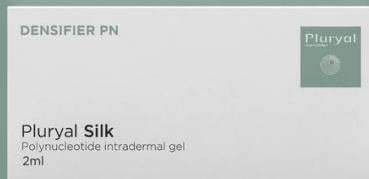


Pluryal Silk
2 ml



Pluryal Densify
2 ml



Pluryal Biosculpture
2 x 1,1 ml

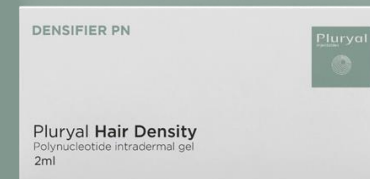

Pluryal Hair Density
2 ml

Bezpiecznie regeneruje skórę w okolicach oczu oraz delikatnych obszarach bez ryzyka alergii czy powikłań.

Wysoko oczyszczone polinukleotydy HPN w formie frakcji naturalnych łańcuchów DNA o masie cząsteczkowej 300-500 Da, wyekstrahowanej z nasienia łososa (unikalny proces produkcyjny) zbliżony do ludzkiego DNA.

Intensywnie regeneruje i odbudowuje skórę

Wyjątkowa i unikalna formuła całkowitej regeneracji skóry: **PN + ha 1000 kD + Mannitol** zapewnia synergiczne działanie zagęszczająco - nawilżające skórę.

Odbudowuje objętość i zapewnia nawilżenie

Działanie trzech rodzajów HA o różnej masie cząsteczkowej: 1 mln Da i 2 mln Da. Interkalacja z wolnym kwasem hialuronowym 500k Da w celu jego ochrony przed degradacją enzymatyczną.

Wzmacnia skórę głowy i stymuluje wzrost włosów

Wysoko oczyszczone polinukleotydy HPN w formie gęstości frakcji idealnej do zabiegów na skórę głowy. Odżywia mieszki włosowe i wzmacnia skórę głowy. Zwiększa liczbę i średnicę włosów.

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:



Bezpieczeństwo stosowania leków i wyrobów medycznych, zgodnie art. 31 ust. 1, ust. 5-7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

1. **Zgodnie z IFU** – według wskazań i przeciwwskazań producenta, zgodnie z przepisami prawa i ChPL. Działania objęte są OC, możliwością zgłoszenia działań niepożądanych, ochroną prawną w razie powikłań.

2. **OFF LABEL** – czyli „poza wskazaniami”. Dopuszczalne przy leczeniu, jeśli producent nie podaje informacji o wskazaniach (brak badań) a korzyści przewyższają możliwe skutki uboczne. OC lekarza tu obowiązuje ale lekarz musi mieć świadomość, że **bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną (w tym karną) za zabieg i wystąpienie ewentualnych skutków ubocznych**.

3. **Niezgodnie z IFU** - to skrajna forma „OFF LABEL”, gdzie **mimo ostrzeżeń i przeciwwskazań producenta** związanych z badaniami produktu zapisanymi w IFU, **stosuje się produkt znając jego potencjalne niebezpieczeństwo i ryzyko. Lekarz znacząco zwiększa swoim działaniem ryzyko odpowiedzialności cywilnej, karnej, zawodowej** oraz samego regresu ubezpieczeniowego z uwagi na to, że lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.


Każdorazowo przed terapią:

Prawo pacjenta do informacji: art. 9 ust. 1-2 i ust. 7-8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

(...) lekarz ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwych efektach terapeutycznych ale także możliwych skutkach ubocznych aby uzyskać „świadomą zgodę pacjenta na zabieg”.

Pluryal® Densifiers (zagęszczacze tkankowe)

ZOBACZ FILM: <https://www.youtube.com/watch?v=v7seYluPfSQ>

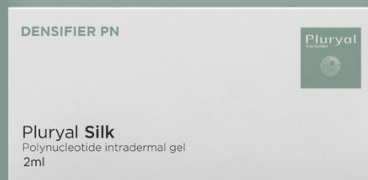


Pluryal Silk

1 x 2 ml

REJESTRACJA MEDYCZNA DO
INIEKCJI.

Obszary zastosowania:

**OKOLICE OCZU,
SZYJA, DEKOLT,
DELIKATNA SKÓRA**

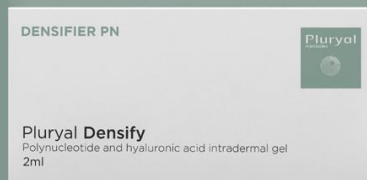

Pluryal Densify

1 x 2 ml


ZAAWANSOWANY
ZAGĘSZCZACZ
I BIOSTYMULATOR
TKANKOWY



Pluryal Biosculpture

2 x 1,1 ml

BIOSTYMULATOR
PROFILUJĄCY

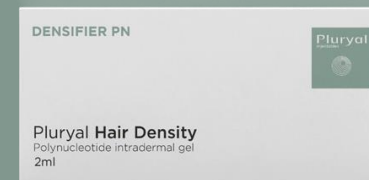

Pluryal Hair Density

1 x 2 ml

REJESTRACJA MEDYCZNA
DO INIEKCJI.

Obszary zastosowania:

**SKÓRA OWŁOSIONA
GŁOWY**

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:



Technologia HPN Innowacyjna regeneracja



Właściwości polinukleotydów w technologii HPN:

ekskluzywny proces produkcji: kontrola każdego etapu produkcji,
od surowca do gotowego wyrobu medycznego,

standard produkcyjny firmy farmaceutycznej,

PDRN klasy farmaceutycznej,

wysoko oczyszczone DNA gwarantuje brak reakcji zapalnych,

oczyszczanie w wysokiej temperaturze (w celu usunięcia wszelkich
śladów białka) oraz sterylizacja,

uzyskany z frakcji DNA o różnych długości łańcucha (masa
cząsteczkowa od 80 do 2000 kDA) zbliżone do ludzkiego DNA,

przeciwalergiczny i w pełni wchłaniany

brak interakcji z peptydami lub farmakologicznie aktywnymi białkami;

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:



Pluryal Silk

Luksemburg



**REJESTRACJA MEDYCZNA DO INIEKCJI.
OBSZAR ZASTOSOWANIA:**

OKOLICE OCZU, POWIEK oraz na cienką
skórę

BEZ PRZECIWWSKAZAŃ dla obszaru dolnej
powieki czy doliny łez

Pluryal Silk

w obserwacjach i badaniach klinicznych nie odnotowano skutków ubocznych w postaci: obrzęków, reakcji alergicznych po iniekcjach

regeneruje, odżywia, wygładza i bio-rewitalizuje delikatne obszary (wokół oczu, szyi, dekoltu)

poprawia sprężystość i elastyczność skóry

przywraca skórze odpowiedni metabolizm

SKŁAD:

Polinukleotydy HPN 15mg (7,5mg/ml): regeneracja tkanek, Izotoniczny, lepkosprężysty, niepirogenny, sterylny żel

pH: 7.2 (neutralne), brak bolesności przy iniekcjach

MEDYCZNA REJESTRACJA DO INIEKCJI.
OBSZAR ZASTOSOWANIA:
INIEKCJE W OKOLICACH OCZU

3x zabieg co 3 tygodnie.
1x podtrzymujący po 5 miesiącach



Pluryal Silk

WYSOKI PROFIL BEZPIECZEŃSTWA I SKUTECZNOŚĆ
POTWIERDZONY PRECYZYJNĄ REJESTRACJĄ MEDYCZNĄ
I SKUTECZNOŚCIĄ KLINICZNĄ

INSTRUKCJA UŻYCIA

Pluryal® Silk jest podawany przez wstrzyknięcie roztworu do skóry właściwej za pomocą cienkiej igły (zwykle 30 G). Dzięki swojej wszechstronności i łatwości użycia, Pluryal® Silk może być używany na każdym rejon skóry:

okolice oczu, skóra okolicy łuku jarzmowego, twarz, szyja, dekolci, brzuch, pośladki, uda, skóra głowy, czoło, łuki brwiowe, (...)

WYSOKI PROFIL BEZPIECZEŃSTWA:
JEDYNI PODSTAWOWE PRZECIWWSKAZANIA
DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH

PRZECIWWSKAZANIA


Stosowanie Pluryal® Silk jest przeciwwskazane u pacjentów, którzy: nadwrażliwy na którykolwiek ze składników produktu lub z historią **alergii na produkty pochodzące z ryb**. Ponieważ żadne dane kliniczne nie są dostępne przy stosowaniu produktu u pacjentów **z chorobami autoimmunologicznymi, u kobiet w ciąży lub karmiących piersią lub u pacjentów poniżej osiemnastego roku życia**, w takich przypadkach odradza się stosowanie Pluryal® Silk.

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:




Pluryal Silk


Control on day 9

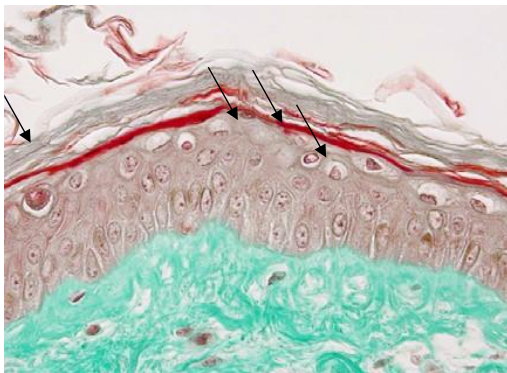


PLURYAL® SILK (P3) on day 9

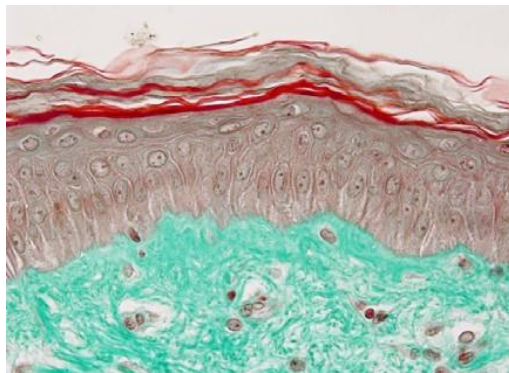

Control on day 9

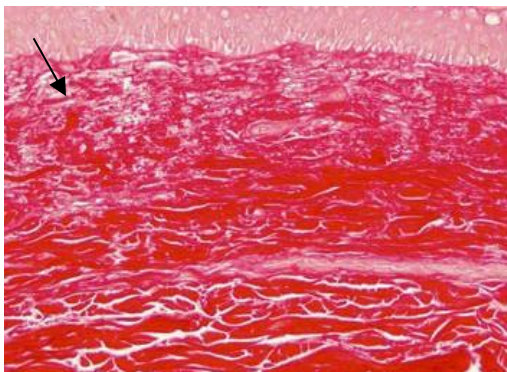

PLURYAL® SILK (P3) on day 9

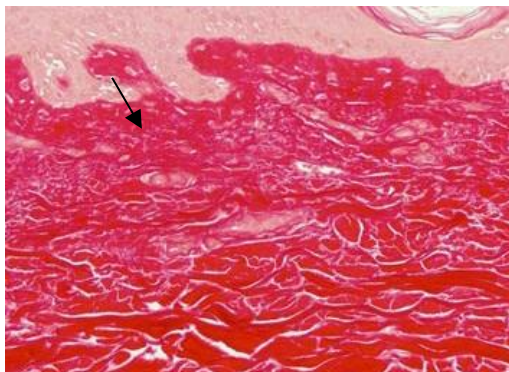

Skuteczność potwierdzona
klinicznie: Wyniki badań ex-vivo

Badanie ogólnej morfologii
komórek i tkanek po barwieniu
trichromem Massona.

**Wynik: Zwiększona grubość
i żywotność naskórka**


Ocena całkowitej zawartości
kolagenu w skórze właściwej po
barwieniu czerwienią Sirius.

**Wynik: Zwiększenie ilości
kolagenu w skórze**

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:

 **INNMEDIS**

Pluryal Silk

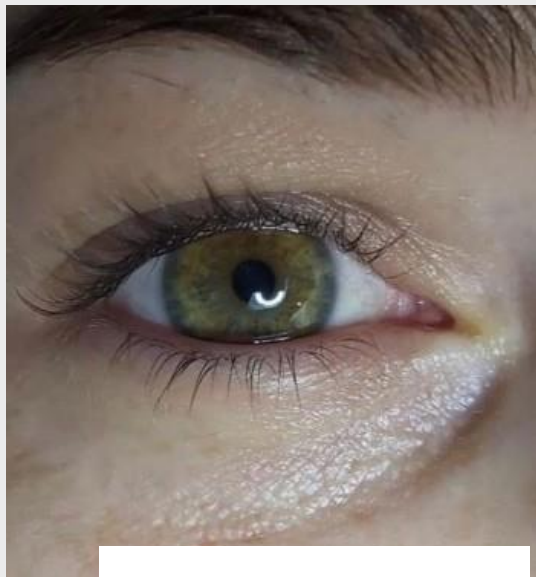

PRZED ZABIEGIEM



DWA TYGODNIE
PO 2 ZABIEGU



Przed

Po

Zabieg wykonany przez
Dr n med. Lidię Majewską
ESME CLINIC.

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:



Pluryal Silk

Przed



Po



Courtesy of
Dr. Hristina HAYDUDOVA
Dermatology Bulgaria



PRZED ZABIEGIEM



TRZY TYGODNIE PO ZABIEGU

Courtesy of Dr. Firas ZREIQY
Reconstructive and Aesthetic
plastic surgery, France


WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:





Pluryal Silk

TECHNIKI INIEKCJI

Mezoterapia
(płytką/ głęboka)

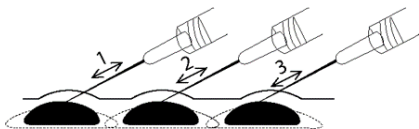

Technika liniowa
(igła/kaniula)

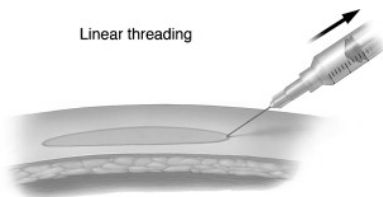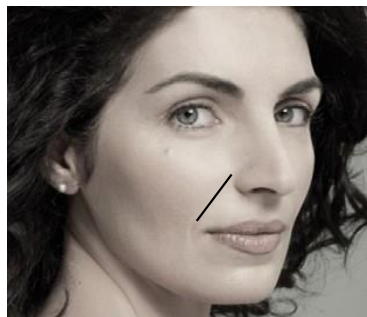

GŁĘBOKOŚĆ PODANIA

Warstwa podskórna (ciało,
szyja, dekolt)
Skóra właściwa (oczy, usta)

Protokół zabiegowy:

3x zabieg co 3 tygodnie.

Zabieg przypominający:

1x co 4-5 miesięcy

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:



PLURIAL
DENSIFY

AS
FLAWLESS
AS
IT CAN BE

REVITALIZED YOUR
SKIN FROM WITHIN



REGENERATIVE
DERMAL
INNOVATION!

Plurial

Pluryal Densify

ZAAWANSOWANY ZAGĘSZCZACZ I BIOSTYMULATOR TKANKOWY

intensywnie regeneruje oraz odbudowuje gęstość skóry

wyjątkowa i unikalna formuła całkowitej regeneracji skóry:

- + polinukleotydy (HPN)
- + HA
- + mannitol (wydłużenie działania i spowolnienie degradacji HA i PN)

zapewnia synergiczne działanie zagęszczające skórę

SKŁAD:

Polinukleotydy HPN 20mg (10mg/ml): regeneracja tkanek Kwas hialuronowy 20mg (10mg/ml): głębokie nawilżenie

Mannitol 40mg: przeciwutleniacz, przedłuża działanie kwasu hialuronowego chroniąc go przed degradacją

pH: 7.2 (neutralne), brak bolesności przy iniekcjach



MEDYCZNA REJESTRACJA DO INIEKCJI.
OBSZAR ZASTOSOWANIA:

na skórę twarzy i ciała

3x zabieg co 3 tygodnie.

1x podtrzymujący po 5 miesiącach

Pluryal Densify

WYJĄTKOWA I ORYGINALNA FORMUŁA
CAŁKOWITEJ REGENERACJI SKÓRY

PN + HA + MANNITOL

POLINUKLEOTYDY:

Głęboko nawilżają skórę
Wspomagają regenerację tkanek:
Stymulują wzrost fibroblastów,
syntezy włókien elastyny, kolagenu, HA
Poprawiają elastyczność i odporność
skóry

HA:

Masa cząsteczkowa: 1000 kDa
Wspomaga przeżywalność
fibroblastów,
Mocno nawilża skórę

MANNITOL:

wydłuża działanie HA chroniąc
go przed degradacją
Antyoksydant
Działanie przeciwobrzękowe
i przeciwwysiękowe


WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:




Pluryal Densify

Sprawdzone działanie: wyniki badania ex-vivo

Aktywność w zakresie fibronektyny (ocena ekspresji fibronektyny w skórze właściwej po immunoznakowaniu fluorescencyjnym)

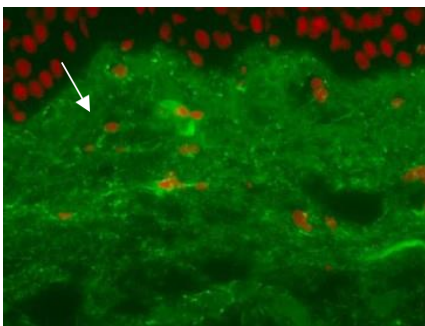

Control on day 9

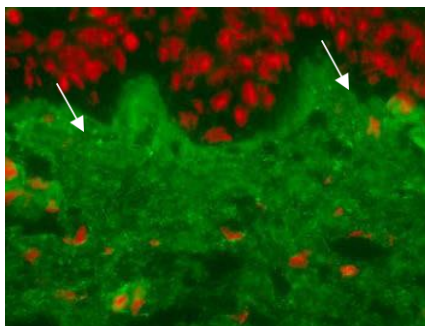

PLURIAL® Densify (P1) on day 9

Wzrost fibronektyny w brodawkowatej i górnej siateczkowatej skórze właściwej

1.(Akiyama i wsp., The Journal of Cell Biology. 1989. 109 863-875; Bitterman i wsp., 1983. The Journal of Cell Biology. 97 1925-1932; Postlethwaite i wsp., 1981 Czasopismo Medycyny Doświadczalnej, 153 494-499).

2.(Larjava i wsp., 2002. Inwazja komórek. 3 42-64).

Fibronektyna jest białkiem strukturalnym w macierzy zewnątrzkomórkowej. Odgrywa w skórze kilka biologicznych ról; jest czynnikiem wzrostu, cząsteczką adhezyjną i środkiem chemotaktycznym dla fibroblastów¹, uczestniczy w odkładaniu i montażu włókienek kolagenowych. Ponadto kontroluje migrację keratynocytów podczas gojenia². W ten sposób fibronektyna stymuluje fibroblasty i bierze udział w restrukturyzacji poziomego kolagenu w macierzy zewnątrzkomórkowej.

Immunoznakowanie fibronektyny pokazuje, że im więcej zielonej fluorescencji, tym więcej fibronektyny. Uwaga: na czerwono, barwienie kontrastowe jąder w celu oznaczenia komórek.

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:



Pluryal Densify



Wszystkie te dane są parametrami używanymi przez oprogramowanie VISIA do analizy stanu skóry, a wynik jest wyświetlany jako Twój wiek „TruSkin”.

Pokazuje nam, że już po 2 zabiegach skóra zaczyna wyglądać znacznie młodziej, niż może być w realnym wieku.

VISIA analizuje wiek skóry według różnych parametrów: brązowe plamy, głębokość zmarszczek, tekstura skóry, pory i czerwone plamy.

Pacjent ma 53 lata, zmierzony wiek jego skóry to 59 (po lewej) i 57 (po prawej).

Już po dwóch zabiegach Pluryal Densify wiek skóry pacjenta spada do 44 lat!


WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:



Pluryal Densify

Sprawdzona wydajność ex vivo: kultury ludzkich fibroblastów

Pluryal Densify jako hybryda stymuluje bardziej ludzkie fibroblasty (+50%) niż sam PN lub sam HA

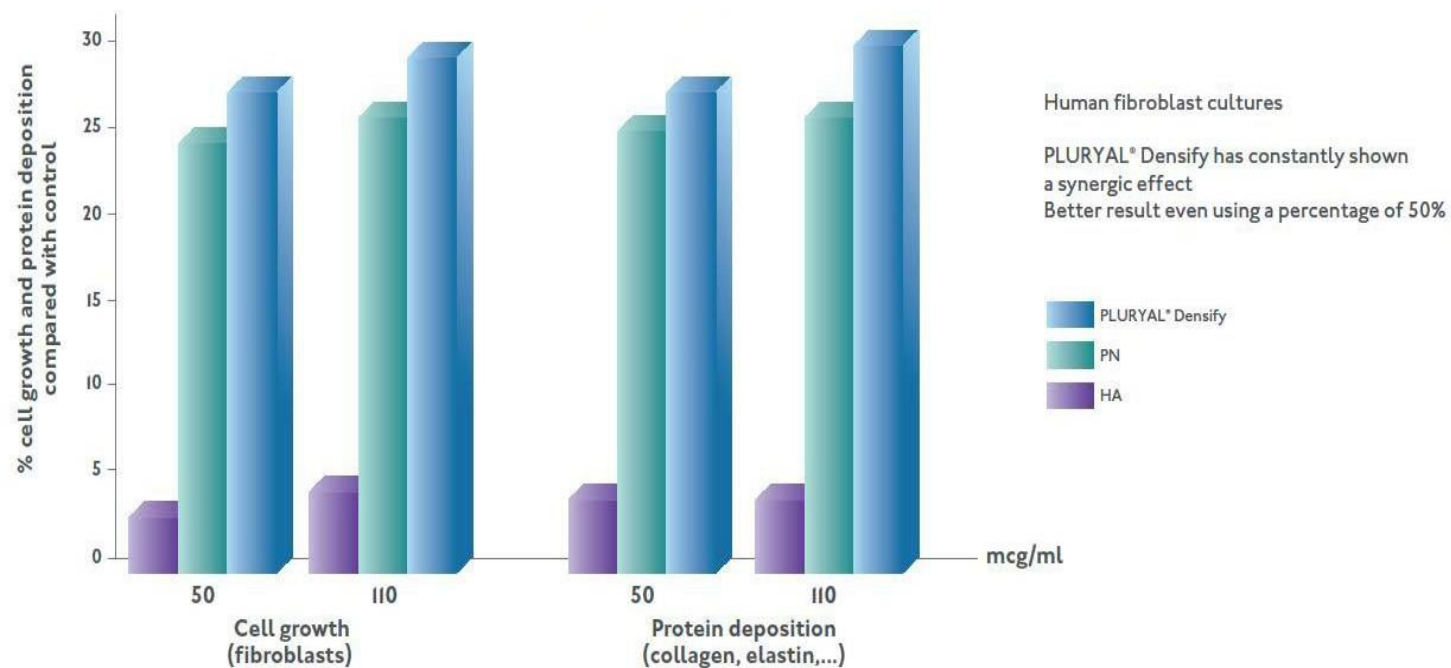


WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:





Pluryal Density

TECHNIKI INIEKCJI

Mezoterapia
(głęboka)

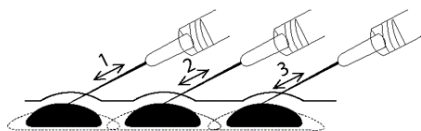

Technika liniowa
(igła/kaniula)

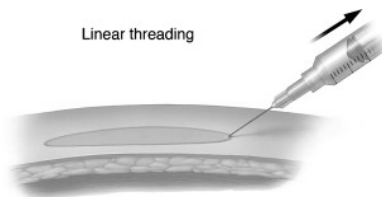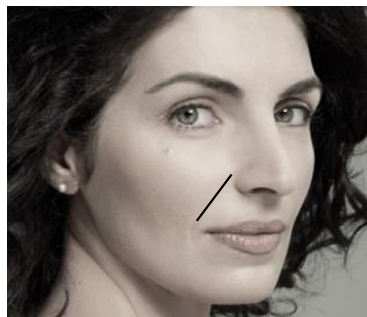


Protokół zabiegowy:

3x zabieg co 3 tygodnie.

Zabieg przypominający:

1x co 4-5 miesięcy

PODEJŚCIE ANATOMICZNE: Technika BAP 5 pkt, 6 pkt,
Double7Lift (kaniula 18-23G 70 mm)

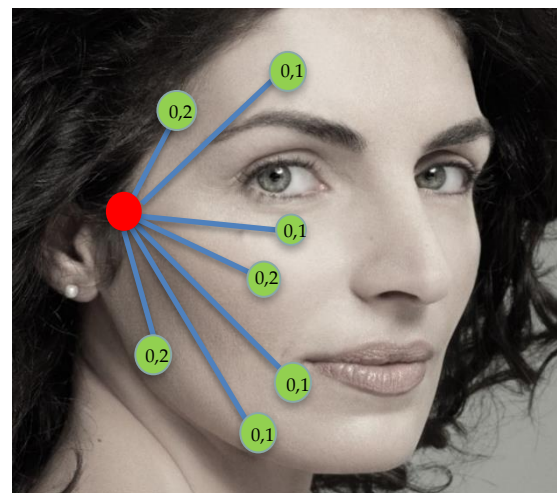

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:



PLURYAL BIOSCULPTURE

RESTORATIVE
BEAUTY
INNOVATION!

AS
RESTRUCTURED
AS
IT CAN BE

DENSIFIED & REVITALIZED SKIN



WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:



Pluryal Biosculpture

HYBRYDOWY BIOSTYMULATOR PROFILUJĄCO - STYMULUJĄCY

Odbudowuje objętość i zapewnia nawilżenie

Unikalne działanie trzech rodzajów ha o różnej masie cząsteczkowej:
1 mln Da i 2 mln Da tworzących **MATRYCĘ 3D** profilującą tkankę

MATRYCA 3D chroni przed degradacją enzymatyczną wolny
ha **500 000 Da**, który dłużej nawilża i stymuluje skórę.

Częściowe usieciowanie ha 1mln oraz 2mln, powoduje ich wolniejszą
degradację, dłuższe wypełnienie oraz dłuższą ochronę kwasu 500k Da.

SKŁAD:

25 mg/g kwasu hialuronowego, w tym 10% wbudowane w matrycę 3D,
aby zapewnić „inteligentne” działanie biologiczne.

WYKORZYSTYWANA TECHNOLOGIA: Matryca 3D

Izotoniczny, lepkosprężysty, niepirogenny, sterylny żel jednofazowy
(pojedyncza faza płynna), kalibrowany (cząstki 50 mikronów)

pH: 7.2 (neutralne), brak bolesności przy iniekcjach

TECHNOLOGIA MATRICYAL 3D

INNOWACJA WŚRÓD BIOSTYMULATORÓW



UWAGA:

produkt na 2 osobne zabiegi

2x zabieg co 4 tygodnie.
1x podtrzymujący po 6 miesiącach

Controlled-release 3D matrix

FIG.1 : GENTLE CROSS-LINKING OF TWO HYALURONIC ACID WITH TWO DIFFERENT MOLECULAR WEIGHTS



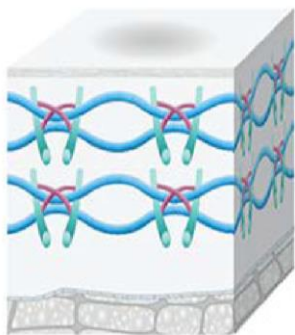


FIG.2 : LAYERING OF NATIVE HYALURONIC ACID

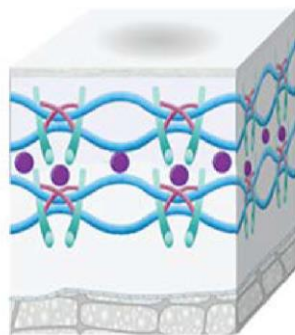

A cross-linked HA layer alternated with one free HA layer

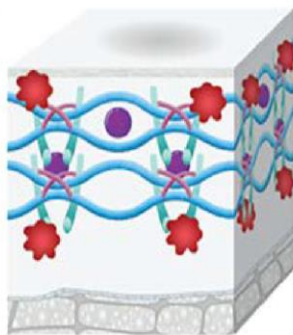



The layered free HA is protected against enzymatic degradation and is released slowly



Powolne sieciowanie: **Długi czas sieciowania w niskiej temperaturze** w celu uzyskania niekalibrowanego, jednofazowego żelu o optymalnej lepkości. **2 rodzaje kwasu hialuronowego o różnych masach cząsteczkowych (1 milion Da, 2 miliony Da)** są częściowo usieciowane BDDE w celu utworzenia stałej matrycy 3D.

Dzięki temu, warstwa 500 kDa jest chroniona przed enzymatyczną degradacją hialuronidazy. Następnie **hialuronian jest stopniowo uwalniany** w czasie nawilżając i stymulując tkankę **do 6 miesięcy**.



Aktywność związana z kwasem hialuronowym (ocena ekspresji kwasu hialuronowego w brodawkowej skórze właściwej po znakowaniu HABP).

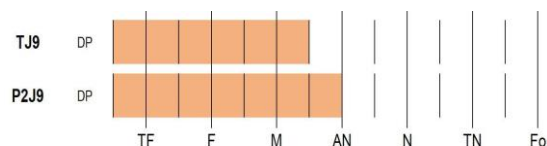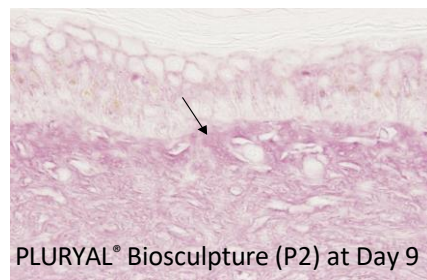

TF=very low; F=low; M=moderate; AN=quite clear; N=clear; TN=very clear; Fo=strong

Zwiększona ilość kwasu hialuronowego w górnej brodawkowej i siateczkowej skórze właściwej

Aktywność związana z fibronektyną (ocena ekspresji fibronektyny w skórze właściwej po immunoznakowaniu fluorescencyjnym).

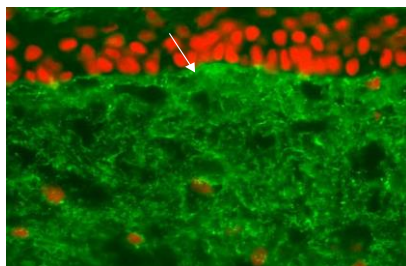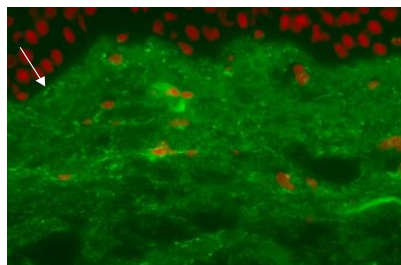

Znaczny wzrost fibronektyny w górnej brodawkowej i siateczkowej skórze właściwej

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:



Pluryal Biosculpture

BEFORE

AFTER



Leczenie: Kąty żuchwy, 22G – 70 kaniuli, Zastrzyk: 2,2 ml z
każdej strony. Natychmiastowy efekt: restrukturyzacja twarzy

Courtesy of Dr. Ilya SHAROV
Aesthetic and Plastic Surgery

BEFORE

AFTER



Zabieg: „kurze łapki”, opadanie powieki, środkowej jednej trzeciej twarzy, podbródek, twarz zmęczona
Efekt : Likwidacja drobnych zmarszczek, uzupełnienie objętości, nawilżenie.

Courtesy of Dr. Daniela
MODERT-PASCU
*Morphological & Aesthetic medicine
Luxembourg*

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:




Pluryal Biosculpture



BIOPSTYMULATOR PROFILUJĄCY

TECHNIKI INIEKCJI


Mezoterapia
(głęboka)

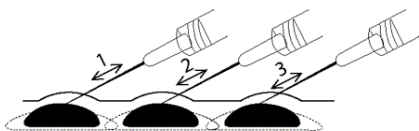


Technika liniowa
(igła/kaniula)

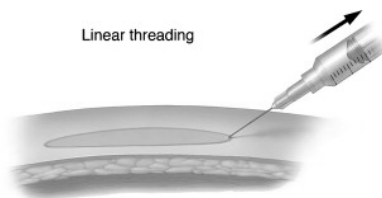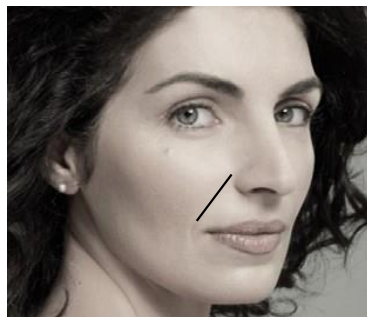

PODEJŚCIE ANATOMICZNE:
Technika BAP 5 pkt, 6 pkt,
Double7Lift (kaniula 18-23G 70 mm)

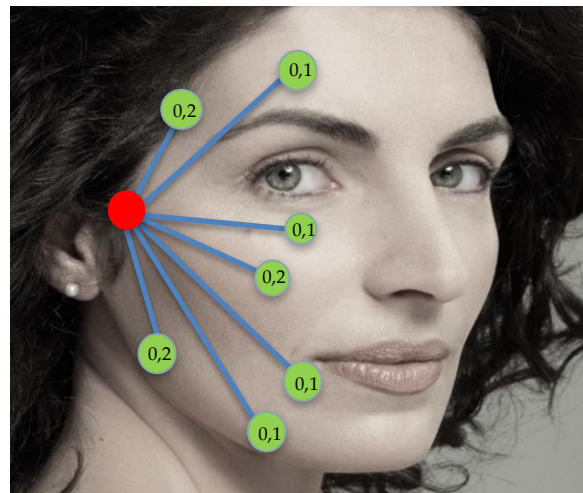

Technika FAN

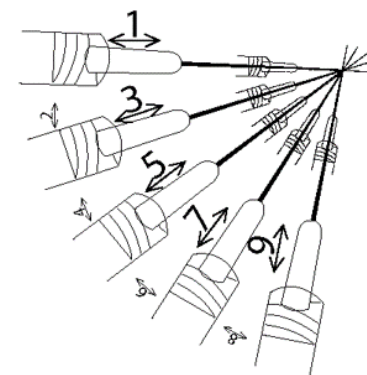

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:




PLURYAL HAIR DENSITY

AS STRONG
AS
IT CAN BE

NOURISHED & FORTIFIED HAIR

HAIR
DENSIFYING
INNOVATION!

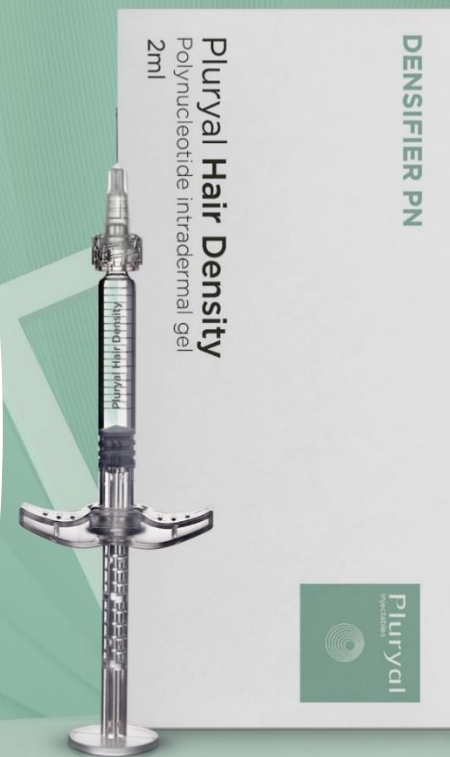

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:



Pluryal Hair Density

PIERWSZY NA ŚWIECIE PDRN DO INIEKCJI NA SKÓRĘ OWOSIONĄ

wzmacnia skórę głowy i stymuluje wzrost włosów

wysoko oczyszczone polinukleotydy w formie gęstości
frakcji idealnej do zabiegów na skórę głowy

odżywia mieszki włosowe i wzmacnia skórę głowy

zwiększa liczbę i średnicę włosów

SKŁAD:

Polinukleotydy HPN 15mg (7,5mg/ml): regeneracja tkanek
pH: 7.2 (neutralne), brak bolesności przy iniekcjach



MEDYCZNA REJESTRACJA DO INIEKCJI.
OBSZAR ZASTOSOWANIA:
INIEKCJE NA SKÓRĘ OWŁOSIONĄ

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:



Pluryal Hair Density

WYSOKI PROFIL BEZPIECZEŃSTWA I SKUTECZNOŚĆ
POTWIERDZONY PRECYZYJNĄ REJESTRACJĄ MEDYCZNĄ
I SKUTECZNOŚCIĄ KLINICZNĄ

INSTRUKCJA UŻYCIA

Pluryal® Hair Density podaje się przez wstrzyknięcie roztworu do skóry właściwej za pomocą cienkiej igły (zwykle 30 G). Dzięki swojej wszechstronności i łatwości użycia, Pluryal® Hair Density może być stosowany na dowolny obszar skóry: **skórę głowy, czoło, łuki skóry brwi (...)**

WYSOKI PROFIL BEZPIECZEŃSTWA:
JEDYNI PODSTAWOWE PRZECIWWSKAZANIA
DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH

PRZECIWWSKAZANIA


Stosowanie Pluryal® Hair Density jest przeciwwskazane u pacjentów, którzy: nadwrażliwy na którykolwiek ze składników produktu lub z historią **alergii na produkty pochodzące z ryb**. Ponieważ żadne dane kliniczne nie są dostępne przy stosowaniu produktu u pacjentów **chorobami autoimmunologicznymi, u kobiet w ciąży lub karmiących piersią lub u pacjentów poniżej osiemnastego roku życia**, w takich przypadkach odradza się stosowanie Pluryal® Hair Density.

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:




Pluryal Hair Density

Figure 1 Pull test

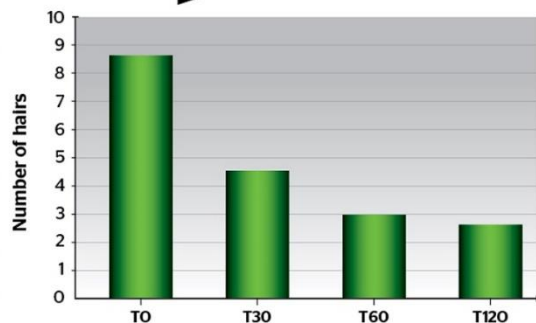


Results of pull test evaluations at baseline (T0) and after 1 month (T30), 2 months (T60), 4 months (T120)

Figure 3 Anagen/telogen ratio

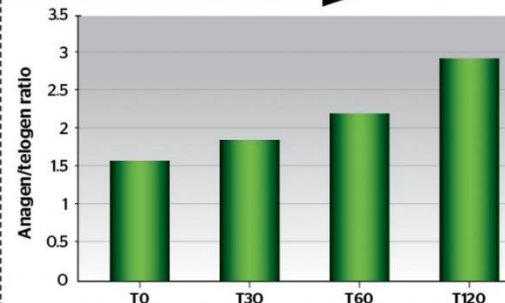

Anagen/Telogen ratio from the Trichogram evaluations at baseline (T0) and after 1 month (T30), 2 months (T60), 4 months (T120)


Figure 2 Trichogram

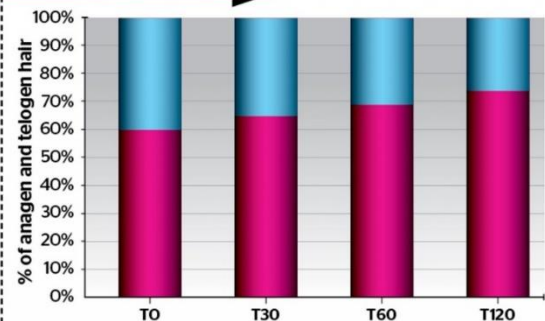

Results of Trichogram evaluations at baseline (T0) and after 1 month (T30), 2 months (T60), 4 months (T120)

■ Telogen
■ Anagen

Figure 4 Wash test

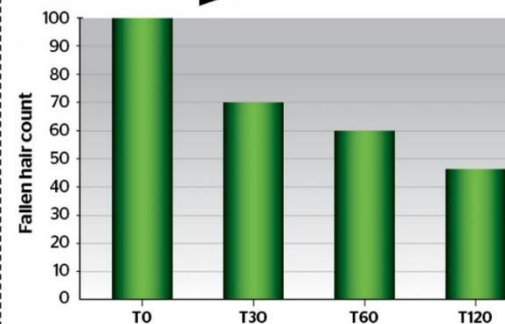

Result of wash test: fallen hair count (wash-test applied by the patient after hair wash) at baseline (T0) and after 1 month (T30), 2 months (T60), 4 months (T120)

Skuteczność potwierdzona klinicznie: Wyniki badań ex-vivo

20 pacjentek w wieku od 25 do 65 lat,
Łysienie telogenowe

Zgodnie z protokołem przedstawionym w badaniu:
3 sesje zabiegowe co 3 tygodnie - polinukleotydy do iniekcji w skórę głowy są skuteczną, bezpieczną i nieinwazyjną procedurą dla pacjentów.

Wyniki tej oceny klinicznej potwierdzają, że stymulacja troficzna wykonywana przez PN w skórę głowy sprzyjała wzrostowi włosów w przypadku hormonalnej utraty włosów u kobiet. To badanie kliniczne potwierdziło również bezpieczeństwo wyrobu medycznego i jego dobrą tolerancję.


Study by Gianfaldoni S, Zanardelli M, Lotti T. on a formulation with 7.5mg/ml polynucleotides Presented in the 23rd World Congress of Dermatology, 8-13 June 2015 Vancouver, Canada

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:


 **INNMEDIS**

Pluryal Hair Density

BEFORE

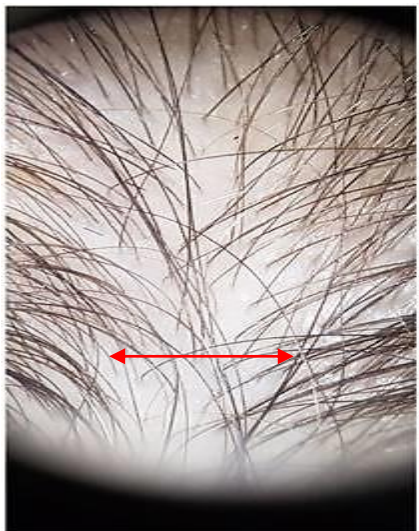

3 months AFTER
TREATMENT

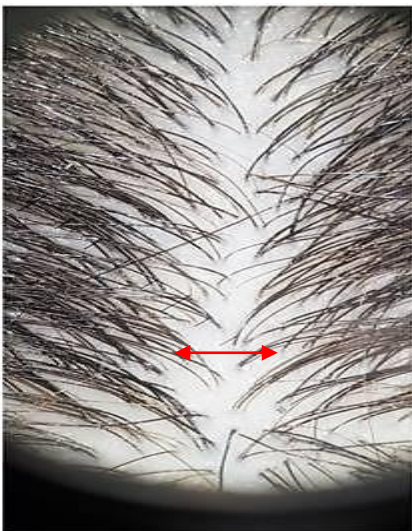

Zastosowany produkt : 4 sesje Pluryal HAIR DENSITY w odstępie 3 tygodni. Iniekcja: 2 ml na zabieg, technika grudek śródskórnych
Efekt : Poprawa gęstości i grubości włosów + Zwiększenie objętości włosów

Courtesy of Dr. Vladlena AVERINA
Dermatovenereology, Aesthetic Medicine & Gynecology
Ukraine

BEFORE



4 months AFTER
TREATMENT



Zastosowany produkt : 5 sesji Pluryal HAIR DENSITY w odstępie 1 tygodnia
Iniekcja: 2 ml na zabieg, technika grudek śródskórnych
Efekt : Poprawa gęstości i grubości włosów + Zwiększenie objętości włosów

Courtesy of Prof. Alexander
TURKEYVCH
Professor in Dermatology
Ukraine

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:



Pluryal Hair Density

WSKAZANIA:

Osłabione włosy: przerzedzenie włókien, wypadanie włosów (łysienie) :

Łysienie androgenowe u kobiet (zawieszona antykoncepcja, zmiany przed- lub poporodowe, niedobory pokarmowe)

Łysienie androgenowe u mężczyzn (utrata miejscowa)

Łysienie telogenowe (utrata w wyniku stresu fizycznego lub psychicznego.

Wypadanie włosów po chorobie COVID

Terapia uzupełniająca: światło LED*, PRP (autologiczne osocze bogatopłytkowe) Terapia uzupełniająca po przeszczepie włosów

HAIR DENSITY: MEZOTERAPIA GŁOWY




<https://www.youtube.com/watch?v=3WjmQp2AtOQ>



WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:



	Pluryal Silk	Pluryal Densify	Pluryal Biosculpture	Pluryal Hair Density
Skład	Polinukleotydy HPN 15mg (7,5 mg/ml)	Polinukleotydy HPN 20mg (10mg/ml) Kwas hialuronowy 20mg (10mg/ml) Mannitol	Częściowo usieciowany kwas hialuronowy (25mg/ml), (1mln Da oraz 2 mln Da) + synteza nieusieciowanego ha 500k Da	Polinukleotydy HPN 15mg (7,5 mg/ml)
Obszar zabiegowy	Obszary delikatne (wokół oczu, szyi, dekoltu)	Uszkodzona skóra twarzy i ciała	Utrata objętości twarzy (, blizny, wiotkość)	Skóra owłosiona
Efekt	Kolor i blask, regeneracja skóry w delikatnych obszarach	Kolor i blask, regeneracja skóry twarzy i ciała	Odbudowa objętości twarzy, zmniejszenie wiotkości	Wzrost i zagęszczenie włosów
Opakowania	1 × 2 ml strzykawka	1 × 2 ml strzykawka	2 × 1,1 ml strzykawki	1 × 2 ml strzykawka
Przedział wiekowy	Od 25 lat	Od 30 lat	Od 35 lat	Od 20 lat
Terapia:	3x zabieg co 3 tygodnie. Zabieg podtrzymujący 1x co 4-5 miesięcy	3x zabieg co 3 tygodnie. Zabieg podtrzymujący 1x co 4-5 miesięcy	2x zabieg co 4 tygodnie. Zabieg podtrzymujący 1x po 6 miesiącach	3-5x zabieg co 1-2 tygodnie. Zabieg podtrzymujący powtórzenie terapii 1x/rok

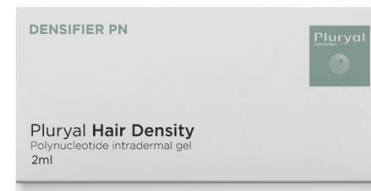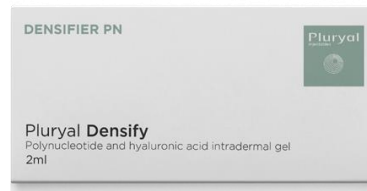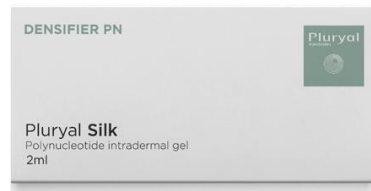

Przykładowe połączenie:


Pluryal Silk 1x2ml (oczy,usta,czoło)

+

Pluryal Biosculpture 1,1ml

Lub

Pluryal Densify 1x2ml

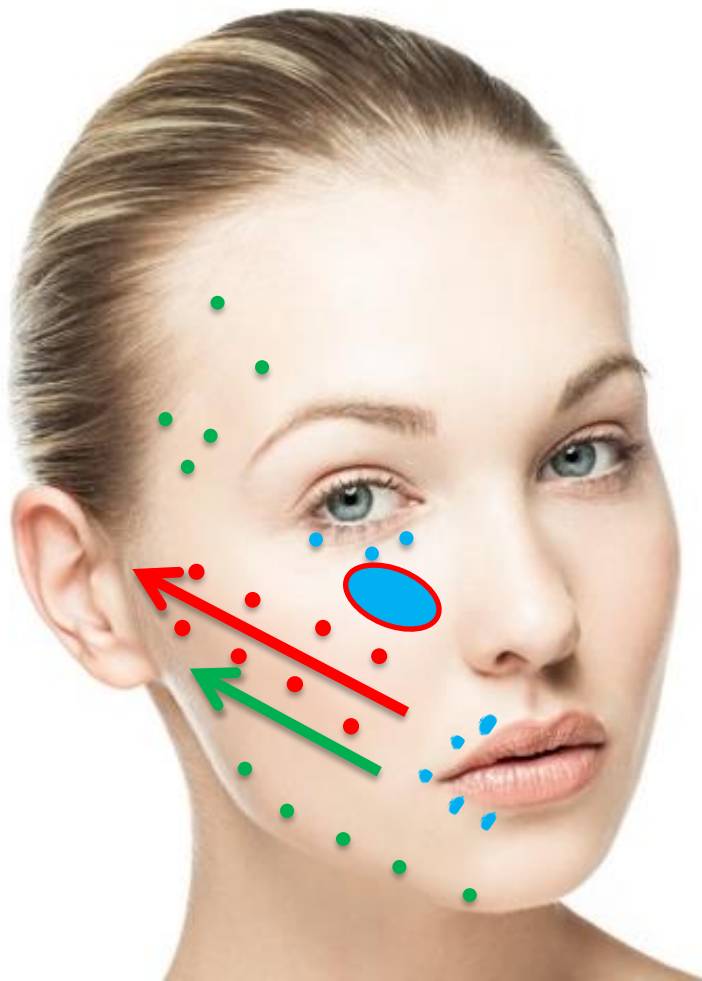


WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:




Double7Lift©

Pojedynczy punkt wejścia
Infiltracja całej twarzy
przez miękką kaniulę

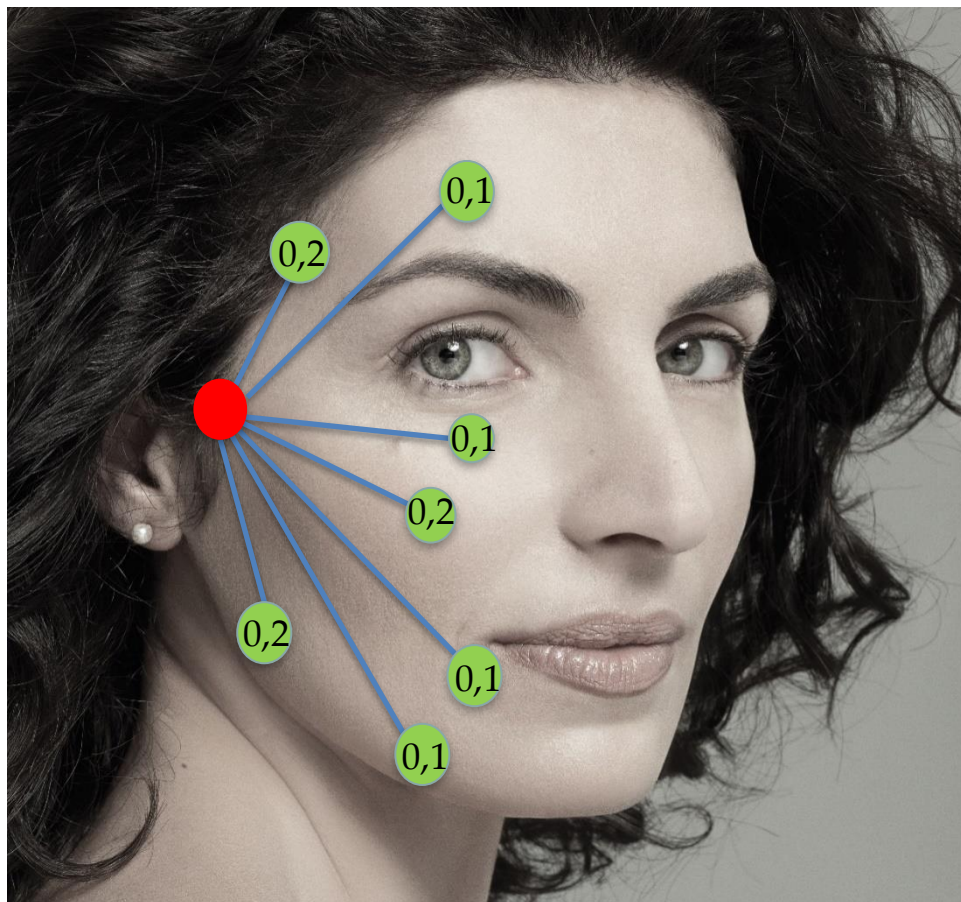

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:



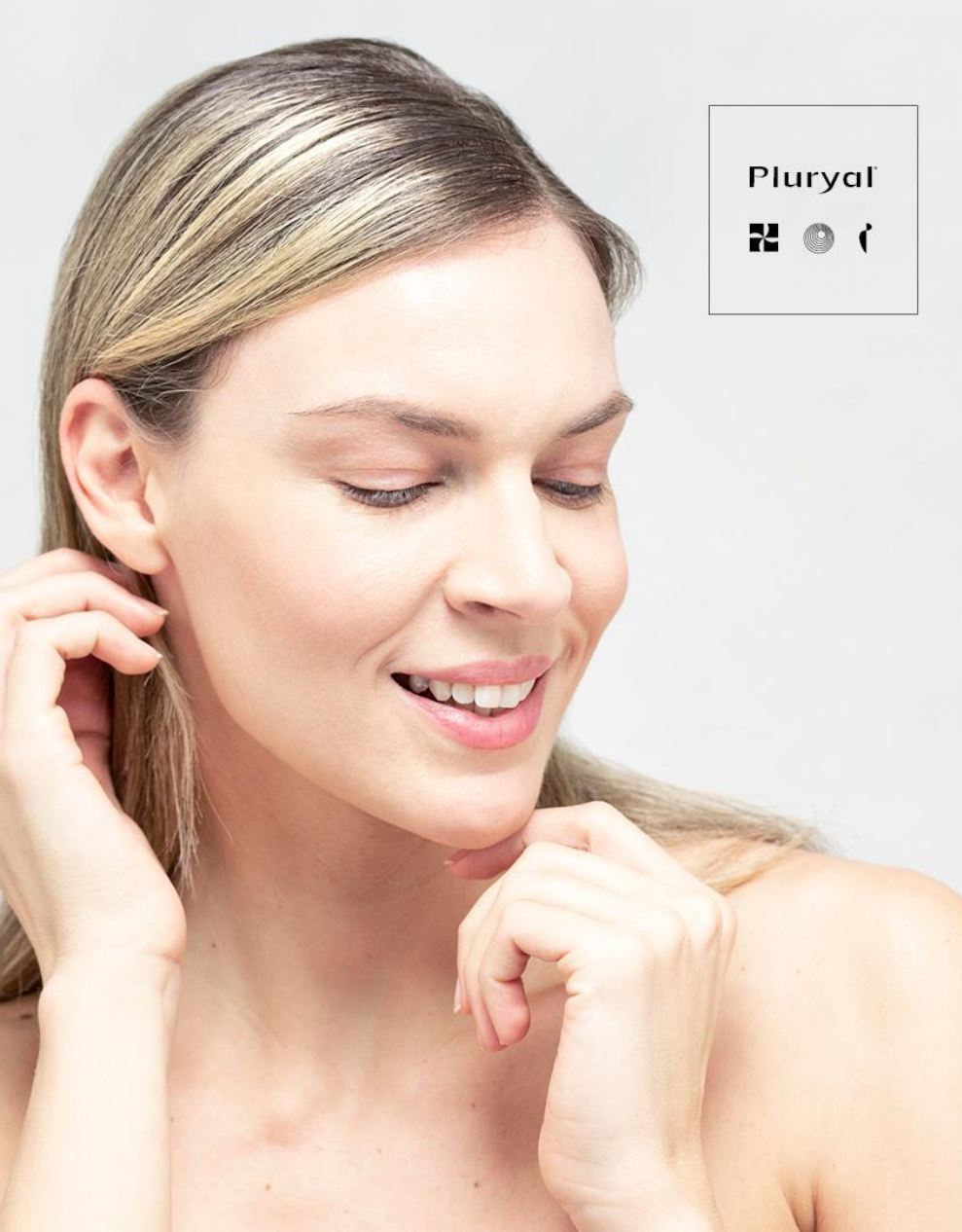

Pluryal



Chcesz korzystać z produktów Pluryal w swoim gabinecie?

Skontaktuj się z nami:

 +48 517 701 405

 biuro@innmedis.pl

Dowiedz się więcej na:

 innmedis.pl

 [/PluryalPL](https://www.facebook.com/PluryalPL)

 [/PluryalPL](https://www.instagram.com/PluryalPL)

Innmedis to jedyny dystrybutor innowacyjnych biostymulatorów Pluryal na terenie Polski.

NIE BIERZEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAKUP PRODUKTÓW Z INNYCH NIEZNANYCH ŹRÓDEŁ.